

FlexiEase

穿戴式泵奶器



使用說明書

介绍

歡迎您加入Eynshan大家庭!作為一名母親或即將成為母親的您，已開啟人生中最美好的旅程，我們很榮幸能成為其中的一部分。

關於Eynshan: Eynshan是領先的品牌，專注於打造高質量的產品，滿足全球母親的特定需求。我們注重創新、安全和便利，致力於為您的母乳餵養旅程提供最佳支持。

了解FlexiEase:

Eynshan FlexiEase穿戴式吸乳器是我們的優質產品，經過廣泛的研究和反饋精心設計。這證明了我們致力於確保您的母乳餵養體驗盡可能自然、舒適和高效。

主要特點:

- 可穿戴:隱蔽式免提，讓您能夠在吸乳的過程內，可進行其他活動，輕鬆吸乳。
- 流線設計:現代、簡潔並人體工學設計，舒適貼合身體。
- 多功能設定:擁有4種模式，每種模式均有9個調整等級，讓您能全面調教舒適吸乳的體驗。
- 穩定性:獨特的設計可以獨立站立，消除了傾覆和溢奶的擔憂。
- 暫停功能:只需一個按鈕，就可以暫時停止吸乳過程，以應對緊急需求無需重新啟動。
- 寂靜操作:專為低噪音而設，這樣您可以不影響工作地吸乳，也不會打擾寶寶的睡眠。
- 溫和且高效:模仿寶寶的自然餵食模式，最大化吸乳輸出，同時確保最大的舒適性。
- 衛生:使用不含BPA的材料製成，並具有閉合系統以防止母乳倒流，確保您的母乳不受污染。

本手冊的目的: 此使用手冊提供了使用、清潔和維護您的FlexiEase穿戴式吸乳器的逐步指南。每一節都經過精心編寫，在指導您，確保安全、舒適和效率。從組裝到故障排除，您將找到專為初學者和有經驗的用戶量身定制的詳細信息。

我們建議在使用吸乳器之前仔細閱讀此手冊，以充分利用您的吸乳體驗。無論您是在家中、工作地點還是在旅途中吸乳，FlexiEase都在此支援您的母乳餵養旅程的每一步。

感謝您信賴Eynshan。祝您哺乳愉快!

安全預防措施

一般安全:

1. 讀取手冊:在操作Eynshan FlexiEase穿戴式吸乳器之前，請始終閱讀並了解此使用手冊。將此手冊保存以供日後參考。
2. 使用前檢查:在每次使用之前，檢查吸乳器及其組件是否有任何損壞或磨損。如果任何部件出現損壞，請勿使用。
3. 遠離兒童:此設備包含小部件。始終將吸乳器及其所有組件放在兒童接觸不到的地方。
4. 設備操作:操作設備時，手要保持清潔。確保您的手上沒有乳液或霜，這可能會污染奶水。

操作安全:

1. 首次使用:在首次使用之前，消毒與乳房和乳汁直接接觸的所有部件。
2. 避免濕接觸:永遠不要將泵奶器的主機浸入水或其他液體中。只有可拆卸部
3. 分才能清洗。
4. 正確位置:確保吸乳器正確地放在您的乳房上，以防止不適或受傷。
5. 舒適設置:從最低的吸力設置開始，然後逐漸增加到舒適的水平。
6. 限制使用時間:為防止乳頭疼痛或受傷，請不要過量力度使用吸乳器。

維護和存儲:

1. 定期清潔:每次使用後清潔和消毒所有可拆卸部件。
2. 安全存儲:不使用時，將吸乳器存放在乾淨、乾燥的地方。
3. 電池護理:Eynshan Flexiease配有內置鋰電池。確保您定期充電以獲得最佳性能。避免存放在極端溫度中。長時間閒置可能會影響電池壽命。

電氣安全:

1. 避免使用多插頭轉接器:始終將設備直接插入電源插座。不要使用多插
2. 頭轉接器或延長線。
3. 電壓檢查:確保電源與適配器上標明的電壓相符。
4. 保持乾燥:不要在水或其他液體附近操作設備，以防止觸電。


如有不適:

停止使用:如果您感到任何不適、疼痛或腫脹，請立即停止使用吸乳器，並諮詢哺乳顧問或醫療提供者。


請記住，您的安全和舒適是至關重要的。如果您遇到任何問題或有擔憂，請與我們的客戶支持部門聯繫以尋求幫助。

產品概述

1

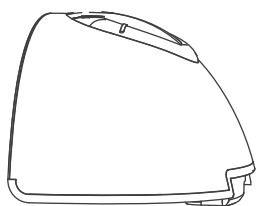


2

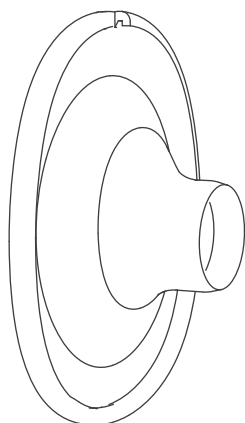


3




4

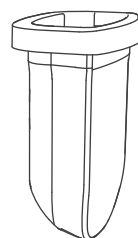


5

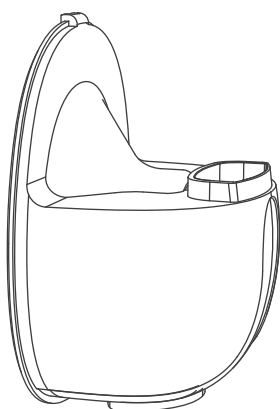

6

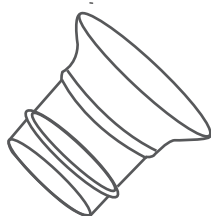

7

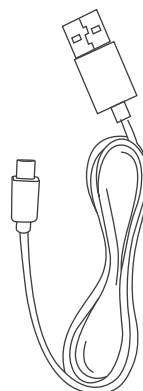

1 主機

2 矽膠喇叭

3 閥門

4 矽膠隔膜


5 母乳收集容器

6 矽膠小喇叭

7 充電線。

Eynshan Flexiease 穿戴式吸乳器現已包括24mm及27mm的矽膠喇叭、兩個閥門、一個150ml的母乳收集容器、一個19mm的矽膠小喇叭，並使用Type-C充電線。

顯示指南

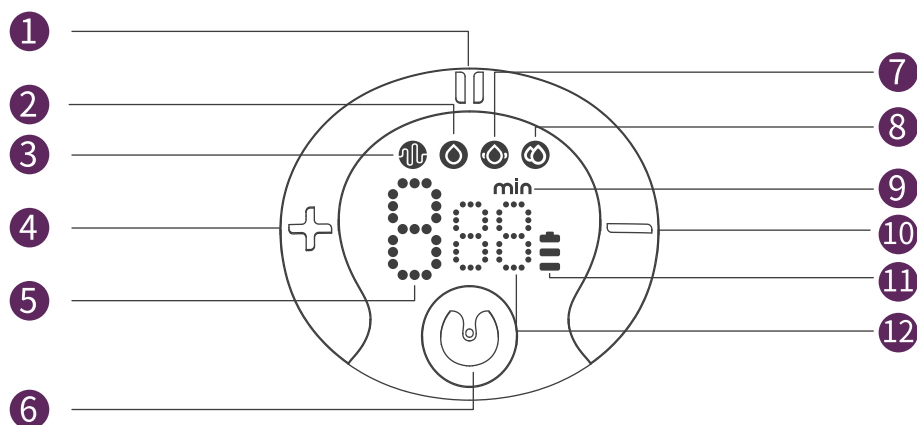

- | | |
|------------|------------|
| ① 暫停/吸奶 | ⑦ 按摩模式 |
| ② 吸乳模式 | ⑧ 自動變頻模式 |
| ③ 按摩吸乳混合模式 | ⑨ 分鐘顯示器 |
| ④ 增強擋位 | ⑩ 降低擋位 |
| ⑤ 力度顯示 | ⑪ 電量顯示器 |
| ⑥ 開關/模式選擇 | ⑫ 持續時間計時器。 |

電池狀態指示器

Eynshan Flexiease 母乳吸奶器配備電量狀態顯示器，以提供您剩餘吸奶時間的資訊。以下是解讀指示器的方法：

3 格:表示剩餘吸奶時間不少於 100 分鐘。


2 格:表示剩餘吸奶時間不少於 70 分鐘。

1 格:表示吸奶器剩餘的持續時間不少於 30 分鐘。

1 格(閃爍):閃爍的格子表示需要即將充電，吸奶時間還剩不少於 10 分鐘。

電池壽命注意事項:隨著時間的流逝，標準使用下內置鋰電池的壽命可能會減少。當電池幾乎耗盡時定期充電可以幫助延長其整體壽命。

⚠ 当充电中，Eynshan Flexiease吸奶器不能启动和吸奶。

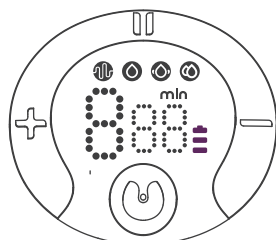

開始使用

開箱: 打開您的包裝，您會發現所有零件整齊地存放。將它們鋪開並檢查是否有任何明顯損壞。

充電: 在您第一次使用之前:


1. 將充電線連接到泵奶器的主機。
2. 將另一端插入牆壁插座。
3. 泵奶器的主機將顯示閃爍的燈，表示正在充電。
4. 在首次使用之前，請充滿電，大約需要2小時。

初始清潔:


1. 將矽膠配件和母乳收集容器的附件與主機分開。
2. 用溫和的肥皂水洗淨。
3. 徹底沖洗並讓它們風乾。

組裝

1. 閥門安裝: 將閥門連接到母乳收集容器上，並按照隨附圖片中的示意確保對齊。

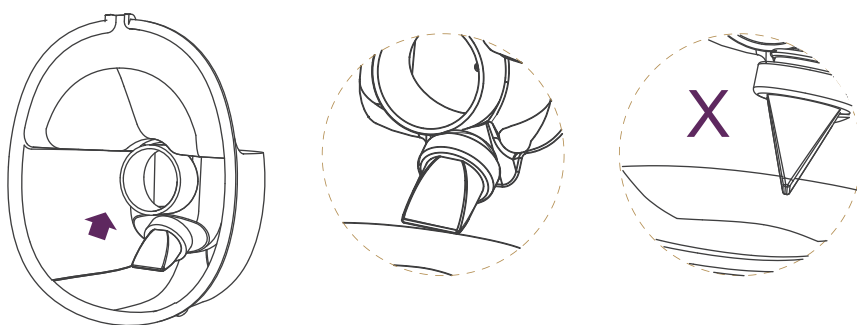


2. 矽膠隔膜放置: 把矽膠隔膜放入母乳收集容器中，並牢固地固定其邊緣以確保完整的密封。

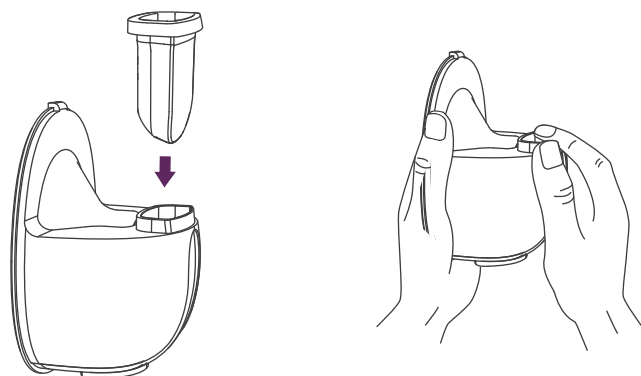


組裝

3. 矽膠喇叭裝配: 將喇叭上的導流槽與母乳收集容器上的迴流槽對齊。用雙手緊緊按壓邊緣以確保密封牢固地到位。

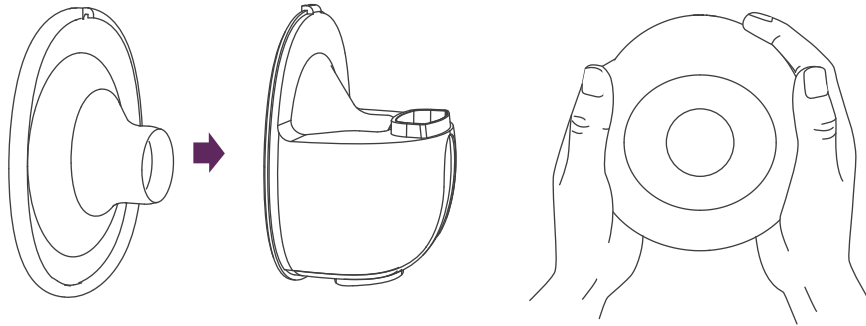

4. 主機安裝: 把主機放在母乳收集容器上。將主機下方的凹槽與矽膠隔膜對齊。向下推，使其緊密地適合於母乳收集容器以確保完全密封。

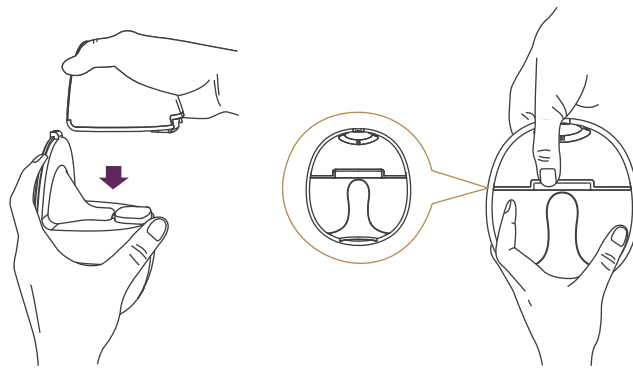


組裝的基本注意事項:


1. 衛生為先: 在操作和組裝之前，請用肥皂和水徹底洗手。確保按照清潔指示清潔泵件。
2. 檢查部件: 每次使用前，檢查每個部件是否有磨損、撕裂或損壞的跡象。替換任何看起來可能受損的部件，以維持最佳性能。
3. 乾燥組裝: 確保所有部件在組裝之前都完全乾燥。即使是少量的水分也可能干擾密封，影響泵的吸力。
4. 精確對齊: 正確對齊凹槽、溝槽和其他連接器至關重要。部件不對齊可能會減少吸力，並可能導致滲漏或溢出。
5. 輕柔但堅定: 連接部件時，使用輕柔但堅定的壓力。這不僅確保了緊密的配合，而且還可以防止損壞矽膠屏蔽或隔膜等精細部件。
6. 閥門和隔膜的護理: 定期檢查閥門和隔膜。它們對於創建高效的吸力和防止乳液回流至關重要。確保它們緊密貼合，且沒有任何變形或殘留物。
7. 避免使用力量: 永遠不要強行將部件組合在一起。如果它們不順利地裝配，可能是因為它們沒有正確對齊，或者某個部件可能已損壞。強行組裝可能導致斷裂或功能減少。

如何使用

安裝: 將矽膠喇叭放在您的乳房上，確保它舒適但貼合得當。

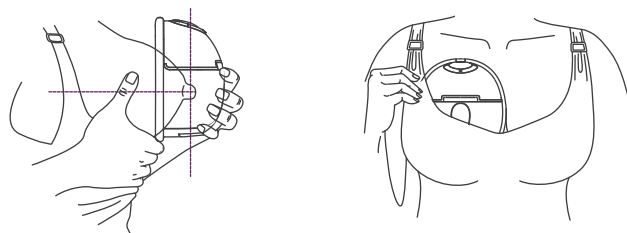


④ 啟動: 按下電源開關；該裝置將以按摩模式啟動以刺激乳液流動。

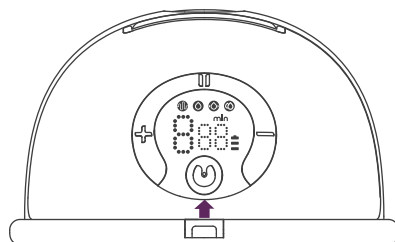


模式設置: 使用模式按鈕根據您的偏好調整模式。

- ④ 按摩模式: 模仿初期快速吸吮，啟動奶水流動。
- ④ 按摩吸乳混合模式: 結合按摩和吸乳功能; 可調整力度。
- ④ 吸乳模式: 模仿深度吸吮; 九種可調節的設定。
- ④ 自動變頻模式: 可根據個人喜好調整節奏和強度。

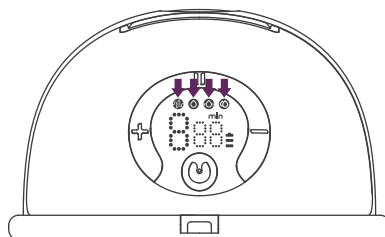


④ 暫停按鈕: 快速停止泵操作; 再按一次即可恢復到先前的設定。適用於短暫中斷，無需重新設置。

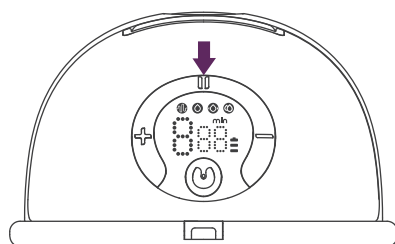


如何使用

✦ 升級按鈕：增加強度/設置。點擊以逐步調整至您的舒適度。

⇐ 降低級別按鈕：降低強度/設置。點擊以獲得更溫和的體驗。

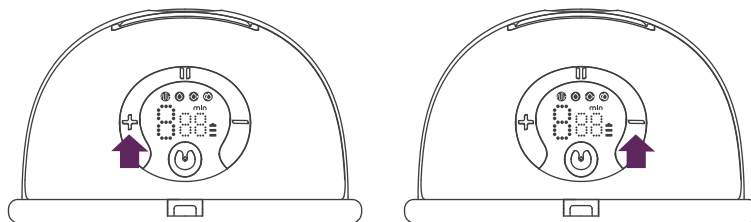


⏻ 關閉按鈕：按住可關閉幫浦。確保設備完全停止。

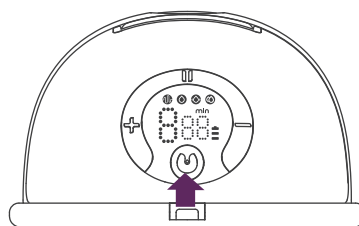

1. 持續時間：為了安全起見，泵會在 20 分鐘後自動關閉。
2. 記憶功能：自動調用您上次的設置，實現無縫吸乳體驗。

泵送姿勢

穿戴式泵送姿勢：保持背部支撐坐好。將泵對齊您的乳房，確保矽膠喇叭形成密封。為了最佳的乳汁流動，保持身體直立。根據需要調整以達到最舒適的狀態。

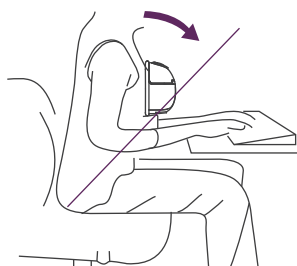


泵送後的步驟


泵送後的步驟：

完成泵送後，輕輕地將Eynshan Flexiease從您的乳房上拆除。確保Flexiease保持直立。取下主泵單元，然後仔細地將乳汁從母乳收集容器倒入儲存瓶或袋中，確保容器的嘴與儲存容器對齊，以防止任何溢出。


1. 關機：泵送完畢後，長按電源開關以關閉。用手指小心地打開矽膠喇叭與您的乳房之間的密封，然後輕輕地拆下泵。

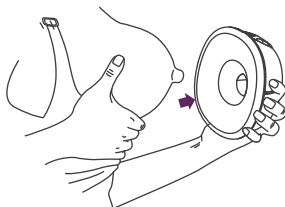

2. 儲存與清潔：將母乳收集容器與主機分開，並適當地存儲。請記得按照提供的清潔指南清潔所有使用過的組件。

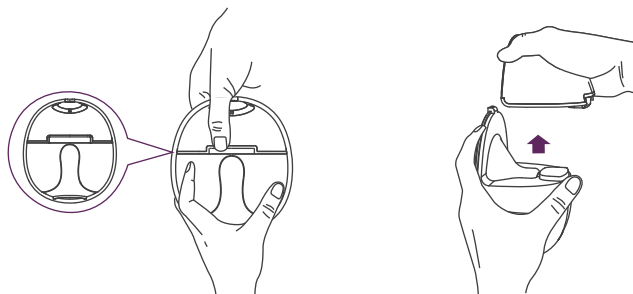

3. 轉移母乳：將您的母乳倒入指定的儲奶瓶或袋中，確保與槽孔特征對齊，以確保無溢出轉移。

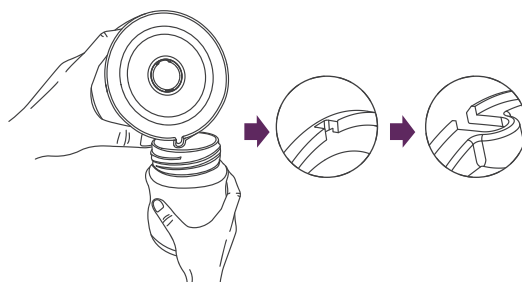

清潔與保養

適當的照顧和維護您的Eynshan Flexiease乳房泵確保其長壽和最佳性能。
。以下是詳細的指南：

每日清潔：

1. 拆解組件：首先，仔細分開Eynshan Flexiease的所有部分，以進行徹底清潔。
2. 初步沖洗：使用後立即在冷水下沖洗每個組件，以去除乳汁，這可以防止污漬和殘留物。
3. 深度浸泡：將部件浸入盛滿溫水和肥皂水的盆中。讓它們浸泡幾分鐘。
4. 輕柔刷洗：使用專用的軟刷或布輕輕刷洗每個部分，確保所有的角落都得到清潔。
5. 最後沖洗：在溫水下徹底沖洗每個部分，以去除所有肥皂殘留物，確保沒有殘留物。
6. 曝氣乾燥：將組件放在乾淨、不掉絮的毛巾或乾燥架上，在通風良好的地方。讓它們自然乾燥，避免直射陽光。

深度清潔：

1. 準備煮沸：確保用於煮沸的鍋是乾淨的。向其中加入足夠的水，完全浸泡乳房泵部分。
2. 沸水消毒：將所有泵部件放入沸水中。讓它們煮沸5分鐘。此消毒過程殺死任何滯留的微生物。
3. 小心取出：使用滅菌鉗子或乾淨的器具，輕輕從沸水中取出每個部分。
4. 冷卻階段：將煮沸的部件放在消毒的托盤或布上。讓它們冷卻幾分鐘。
5. 徹底乾燥：冷卻後，將部件轉移到乾淨、不掉絮的布或專用乾燥架上。確保它們在重新組裝或存儲之前完全乾燥。

維護和更換：

1. 定期檢查：每月至少檢查一次硅膠盾、閥門和其他組件，看是否有磨損或損壞的跡象。
2. 如有需要替換：如果任何部分看起來扭曲、破裂或以任何方式損壞，請立即更換。使用磨損或損壞的部分可能會影響泵的效果和衛生。
3. 安全存儲：不使用時，將您的泵和其組件存放在陰涼、乾燥的地方，遠離直射陽光或極端的溫度。

遵循這些詳細的清潔和維護步驟，您將確保您的Eynshan Flexiease穿戴式泵奶器保持在最佳狀態，為您提供可靠和衛生的抽奶體驗。

故障排除

您的乳房泵是否有問題？以下是幫助您識別和解決常見問題的指南：

1. 泵無法打開：

- 確保電池已充電。
- 檢查充電線是否工作。
- 確保已牢固按下電源按鈕。

2. 吸力弱或無吸力：

檢查矽膠喇叭是否有任何損壞或裂縫。
確保所有部分正確組裝且安裝牢固。
檢查閥門是否有碎屑或乳汁殘留，可能造成堵塞。
確保硅膠隔膜牢固地放在母乳收集容器上。

3. 泵在使用中突然停止：

電池可能已用完。為泵充電。
檢查是否意外地按下了任何按鈕。

4. 抽奶時有噪音：

確保所有組件正確組裝。
檢查矽膠喇叭或隔膜是否磨損且需要更換。

5. 電池不充電：

嘗試使用不同的充電線或電源。
確保充電端口干淨且沒有碎屑。

6. LED顯示故障：

重新啟動泵。
如果問題仍然存在，可能是硬件問題；請聯繫Eynshan客戶服務。

7. 泵漏乳：

確保母乳收集容器沒有裝太滿。
檢查所有部分的對齊和密封，尤其是矽膠喇叭和母乳收集容器。

8. 異常振動：

關閉泵並重新啟動。
檢查部件是否有任何可見損壞或錯誤對齊。

9. 泵使用時感到不舒服：

調整模式和級別設置。
確保矽膠喇叭的大小適合您。
重新調整乳房上的泵以獲得更好的適合度。

注意：如果您無法解決問題，或者如果您的泵有明顯的物理損壞，請勿使用它，並聯繫Eynshan客戶支持以獲得進一步的幫助。定期的維護和清潔也可以防止許多常見的問題。

感謝您選擇Eynshan！

我們非常珍惜您對我們產品的信任。我們努力為您提供高品質的可穿戴泵奶器，支持您的哺乳旅程。

如果您有任何問題、反饋或需要協助，我們專門的客戶服務團隊始終在此為您提供幫助。

如需即時協助：

掃描QR碼與我們的EynCare客戶服務聯絡



或者，您可以：

向我們發送電子郵件：support@eynshan.com

訪問我們的網站：www.eynshan.com

保修資訊

每台Eynshan Flexiease可穿戴泵奶器都附帶2年的國際保修。如需詳細資料和條款，請訪問我們的網站www.eynshan.com。

版權通告：

本手冊內的所有內容，包括但不限於文本、圖表、圖片和徽標，均為Eynshan的專有財產。它們受到版權法和國際版權條約以及其他知識產權法律和條約的保護。未經Eynshan事先書面同意，嚴禁未經授權地複製、分發或傳輸本資料，無論部分還是全部。

商標通告：

“Eynshan”、“Eynshan Flexiease”以及所有相關的徽標、圖標和圖形都是Eynshan在各種司法管轄區的註冊商標或商標。未經Eynshan事先書面同意，嚴禁使用這些商標。此處提及的所有其他產品名稱、徽標、品牌和商標均為其各自所有者的財產，僅用於識別目的。

法律行動：

Eynshan保留對其知識產權的任何未經授權使用採取法律行動的權利。這包括但不限於，對偽造、商標侵權和未經授權分發Eynshan產品或手冊的行動。

權限請求：

有關版權或商標使用的權限，或者如果您希望複製本手冊的任何部分，請通過legal@eynshan.com聯繫Eynshan的法律部門。

免責聲明：

儘管已經盡一切努力確保本手冊中所包含的資訊是準確和完整的，但Eynshan對於錯誤或遺漏，或者因使用本資訊而造成的損害不承擔任何責任。